



Linha de  
Produtos para  
Biossegurança

## Teste Bowie & Dick

# CHEMDYE BD20 FOLHA A5



O teste Bowie & Dick foi desenvolvido para detecção de falha de funcionamento da bomba de vácuo dos esterilizadores a vapor.

Problemas com a remoção do ar ou a qualidade e penetração de vapor são evidenciadas com uma mudança de cor heterogênea do indicador químico com áreas mais claras no centro da folha.

### Características Técnicas

Fabricante: Terragene

Marca: Chemdye®

Modelo: BD20A5

Procedência: Argentina

Dimensões: 210X148 mm

Parâmetros: Ciclos a vácuo 132- 134°C por 3,5 mim

Isento de chumbo e metais pesados.

Indicador químico: Tipo 2

Apresentação: Caixa com 50 unidades.

Validade: 5 anos

Registro ANVISA: Dispensado.

Norma Regulamentadora: ISO 11.140-1, ISO 11.140-3 e ISO 11.140-5.

### Especificações

O teste Bowie & Dick deve ser realizado diariamente ou sempre após manutenção do equipamento.

Interpretação do resultado: Amarelo migra para preto

Condições de armazenamento: T° 10 - 30°C, HR 30 - 80%, manter sob abrigo da luz.

A folha teste deverá ser acondicionada em pacote confeccionado pelo usuário.

Os campos devem ser acondicionados de modo que o pacote tenha em média 30 cm x 23 cm largura por 25 - 28 cm de altura e com peso de aproximadamente 4 kg.

O teste deve ser realizado com a câmara vazia, e o mesmo deve ser posicionado na direção do dreno.

Em caso do teste não apresentar um resultado



BIOSSEGURANÇA

**Sispack Medical**

Rua Doze de Setembro, 1173

CEP 02052-001 São Paulo

sispack@sispack.com.br

[www.sispack.com.br](http://www.sispack.com.br)

# Teste Bowie & Dick

## CHEMDYE BD20 FOLHA A5



homogêneo, a assistência técnica do equipamento deve ser acionada imediatamente.

As folhas devem ser armazenadas para efeito de fiscalização.



BIOSSEGURANÇA

**Sispack Medical**

Rua Doze de Setembro, 1173

CEP 02052-001 São Paulo

[sispack@sispack.com.br](mailto:sispack@sispack.com.br)

[www.sispack.com.br](http://www.sispack.com.br)