



Linha de
Produtos para
Biossegurança

Teste Bowie & Dick

CHEMDYE BD125X1 PLUS - 4KG



O teste Bowie & Dick foi desenvolvido para detecção de falha de funcionamento da bomba de vácuo dos esterilizadores a vapor.

Problemas com a remoção do ar ou a qualidade e penetração de vapor são evidenciadas com uma mudança de cor heterogênea do indicador químico com áreas mais claras no centro da folha.

O Pacote Teste Bowie Dick Chemdye® simula 4kg e é ideal para economizar o tempo do profissional pois já está pronto e evita erros provocados por falhas na confecção dos pacotes e ainda custos com lavanderia ou heterogeneidade nos resultados dos testes. Dotado de folha alerta que antecipa a necessidade de manutenção corretiva da bomba de vácuo.

Características Técnicas

Fabricante: Terragene

Marca: Chemdye®

Modelo: BD125X1

Procedência: Argentina

Composição: Folha teste Bowie & Dick, folha alerta, folhas de papel poroso, espuma reticulada, embalado em papel crepado com indicador químico de processo externo.

Dimensões: 125 x 113 x 16 mm

Parâmetros: Ciclos a vácuo 132- 134°C por 3,5 mim

Isento de chumbo e metais pesados.

Indicador químico: Tipo 2

Apresentação: Caixa com 20 unidades.

Validade: 5 anos

Registro ANVISA: Dispensado.

Norma Regulamentadora: ISO 11.140-1 e ISO 11.140-5.

Especificações

O teste Bowie & Dick deve ser realizado diariamente ou sempre após manutenção do equipamento.

Interpretação do resultado: Amarelo migra para preto

Condições de armazenamento: T° 10 - 30°C, HR 30 - 80%,



BIOSSEGURANÇA

Sispack Medical

Rua Doze de Setembro, 1173

CEP 02052-001 São Paulo

sispack@sispack.com.br

www.sispack.com.br

Teste Bowie & Dick

CHEMDYE BD125X1 PLUS - 4KG



manter sob abrigo da luz.

O teste deve ser realizado com a câmara vazia, e o mesmo deve ser posicionado na direção do dreno.

Em caso do teste não apresentar um resultado homogêneo, a assistência técnica do equipamento deve ser acionada imediatamente.

As folhas devem ser armazenadas para efeito de fiscalização.



BIOSSEGURANÇA

Sispack Medical

Rua Doze de Setembro, 1173

CEP 02052-001 São Paulo

sispack@sispack.com.br

www.sispack.com.br