



Linha de
Produtos para
Biossegurança

Teste Bowie & Dick

CHEMDYE BD125X2 PACOTE 4KG



O teste Bowie & Dick foi desenvolvido para detecção de falha de funcionamento da bomba de vácuo dos esterilizadores a vapor.

Problemas com a remoção do ar ou a qualidade e penetração de vapor são evidenciadas com uma mudança de cor heterogênea do indicador químico com áreas mais claras no centro da folha.

O Pacote Teste Bowie Dick Chemdye[®] é ideal para economizar o tempo do profissional pois já está pronto e evita erros provocados por falhas na confecção dos pacotes e ainda custos com lavanderia ou heterogeneidade nos resultados dos testes.

Características Técnicas

Fabricante: Terragene

Marca: Chemdye[®]

Modelo: BD125X2

Procedência: Argentina

Composição: Folha teste Bowie & Dick, , folhas de papel poroso, embalado em papel crepado com indicador químico de processo externo.

Dimensões: 125 x 125 x 16 mm

Parâmetros: Ciclos a vácuo 132-134°C por 3,5 min ou 121°C por 16,9 min.

Isento de chumbo e metais pesados.

Indicador químico: Tipo 2

Apresentação: Caixa com 20 unidades.

Validade: 5 anos

Registro ANVISA: Dispensado.

Norma Regulamentadora: ISO 11.140-1 e ISO 11.140-4.

Especificações

O teste Bowie & Dick deve ser realizado diariamente ou sempre após manutenção do equipamento.

Interpretação do resultado: Amarelo migra para preto

Condições de armazenamento: T° 10 - 30°C, HR 30 - 80%, manter sob abrigo da luz.



BIOSSEGURANÇA

Sispack Medical

Rua Doze de Setembro, 1173

CEP 02052-001 São Paulo

sispack@sispack.com.br

www.sispack.com.br

Teste Bowie & Dick

CHEMDYE BD125X2 PACOTE 4KG



O teste deve ser realizado com a câmara vazia, e o mesmo deve ser posicionado na direção do dreno.

Em caso do teste não apresentar um resultado homogêneo, a assistência técnica do equipamento deve ser acionada imediatamente.

As folhas devem ser armazenadas para efeito de fiscalização.



BIOSSEGURANÇA

Sispack Medical

Rua Doze de Setembro, 1173

CEP 02052-001 São Paulo

sispack@sispack.com.br

www.sispack.com.br