



TESTE BOWIE & DICK

BOWIE & DICK PACOTE PRONTO COM FOLHA ALERTA BD125X/1



O teste Bowie & Dick foi desenvolvido para detecção de falha de funcionamento da bomba de vácuo dos esterilizantes a vapor.

Problemas com a remoção do ar ou a qualidade e penetração de vapor são evidenciadas com a mudança de cor heterogênea do indicador químico, apresentando áreas mais claras no centro da folha.

O Pacote Teste Bowie Dick Chemdye® simula 4 Kg e é ideal para economizar o tempo do profissional, pois já está pronto e evita erros provocados por falhas na confecção dos pacotes e ainda custos com lavanderia ou heterogeneidade nos resultados dos testes.

Possui uma folha alerta que detecta as falhas de remoção de ar, antes que elas apareçam na folha teste.

Características Técnicas

Fabricante: **Terragene**

Marca: **Chemdye®**

Modelo: **BD125X/1**

Procedência: **Argentina**

Composição: **Folha teste Bowie & Dick, folha alerta, folhas de papel poroso, espuma reticulada, embalado em papel crepado e indicador químico de processo externo.**

Dimensões: **125 x 113 x 16mm**

Parâmetros: **Ciclos a Vácuo 132 – 134°C por 3,5min.**

Isento de Chumbo e Materiais Pesados

Indicador Químico: **Tipo 2**

Apresentação: **Caixa com 20 unidades**

Validade: **5 anos**

Registro ANVISA: **Dispensado**

Normas Regulamentadoras: **ISO 11.140-1 e ISO 11.140-5**



TESTE BOWIE & DICK

BOWIE & DICK PACOTE PRONTO COM FOLHA ALERTA BD125X/1

Especificações

O teste Bowie & Dick deve ser realizado diariamente ou sempre após manutenção do equipamento.

Interpretação do Resultado: Amarelo migra para Preto.

Condições de Armazenamento: Tº 15-30%, HR 30-80% , manter sob abrigo da luz.

O teste deve ser realizado com a câmara vazia, e o mesmo deve ser posicionado na direção do dreno.

Em caso do teste não apresentar um resultado homogêneo, a assistência técnica do equipamento deve ser acionada imediatamente.

A Folha teste deverá ser acondicionada em pacote confeccionado pelo usuário.

