



SANEANTES

PÓ INATIVADOR PARA ORTOFTALDEÍDO OPAMAX

Pó composto por Glicina para inativação do Ortoftaldeído.

Características Técnicas

Fabricante: **Cosmoderma**

Procedência: **Brasil**

Quantidade: **33grs**

Registro ANVISA: **Isento**



Especificações

Método de Inativação e Descarte do Produto:

Adicionar 33g de Glicina em 5 Litros de OPAMAX, fechar a embalagem e agitar o conteúdo para dissolver completamente a Glicina. A neutralização necessita de 40 a 60 minutos para ser efetiva.

Após esse período, o produto poderá ser descartado em rede de esgoto com auxílio de água em abundância. Recomenda-se verificar as normas locais para o correto descarte do produto.