



## SANEANTES

# OPAMAX 0,55%

## Desinfetante de Alto Nível



Desinfetante de alto nível para artigos semi-críticos, equipamentos, dispositivos médicos, cirúrgicos, endoscópios e materiais termossensíveis.

Possui eficácia garantida e comprovada contra *Trichophyton mentagrophytes*, *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli*, *Salmonella choleraesuis*, *Candida albicans*. Esporos: *Clostridium sporogenes* e *Bacillus subtilis*. Micobactérias: *Mycobacterium abcessus subsp. Bolleti mycobacterium bovis* e *Mycobacterium smegmatis*.

A validade da solução em uso é de 40 dias, devendo ser descartada quando apresentar sujidades e/ou alterações na cor e turbidez. Para maior segurança é obrigatório o monitoramento do produto por meio da fita indicadora específica para o OPAMAX 0,55%.

## Características Técnicas

Produto: **Ortoftalaldeído 0,55%**

Fabricante: **Cosmoderma**

Procedência: **Brasil**

Diluição : **Pronto uso**

Temperatura: **Ambiente**

Imersão: **5 minutos**

Estabilidade para Uso: **40 dias com eficácia comprovada pela fita dosadora**

Validade: **2 anos**

Registro ANVISA: **346280047**

Apresentação: **Galão de 1 e 5 Litros**

## Especificações

Não misturar com outros produtos químicos, pois podem prejudicar seu desempenho.



## SANEANTES

# OPAMAX 0,55%

## Desinfetante de Alto Nível



Descarte: Para inativar o Ortoftaldeído, colocar 33grs de Glicina em 5 Litros de Opamax, fechar a embalagem e agitar o conteúdo para dissolver completamente a Glicina. A neutralização necessita de 40 a 60 minutos para ser efetiva.

Após esse procedimento, o produto poderá ser descartado em rede de esgoto com auxílio de água em abundância.

## Segurança

Indispensável a Utilização de EPI para Manipulação