



FITA INDICADORA PARA ORTOFTALALDEÍDO INDICOPAMAX



Fita indicadora desenvolvida para verificação da concentração mínima efetiva (MEC) do desinfetante de alto nível pronto uso OPAMAX 0,55% - Ortoftalaldeído – durante o período de utilização desta solução. A fita indicadora mede a concentração de Ortoftalaldeído, através de uma reação química entre este composto propriamente dito e um composto químico presente na fita teste. A concentração mínima efetiva (MEC) do Ortoftalaldeído em solução será sinalizada pela coloração roxa na fita teste, após o período de contato, desde que esta concentração seja satisfatória.

Este produto foi desenvolvido exclusivamente para testes em solução de Ortoftalaldeído 0,55% - OPAMAX.

Características Técnicas

Fabricante: **Cosmoderma**

Procedência: **Brasil**

Quantidade : **40 Unidades**

Registro ANVISA: **Dispensado**

Modo de Utilização

Para não contaminar a unidade onde está ocorrendo a desinfecção, colocar luvas de procedimento antes de mergulhar a fita na cuba de imersão.

1 – Após colocar as luvas, mergulhar a fita na solução de OPAMAX 0,55% por 2 segundos.

2- Em seguida, retirar a fita e eliminar com cuidado o excesso da solução, que pode dificultar a visualização do resultado.

3 – Aguardar 90 segundos.

4- Comparar a cor que aparece na fita com as cores que aparecem na escala de cores do frasco, que determinam os níveis de Ortoftalaldeído na solução.