



# TESTE BOWIE & DICK

## BOWIE & DICK PACOTE PRONTO BD125X/2

O teste Bowie & Dick foi desenvolvido para detecção de falha de funcionamento da bomba de vácuo dos esterilizantes a vapor.

Problemas com a remoção do ar ou a qualidade e penetração de vapor são evidenciadas com mudança de cor heterogênea do indicador químico, apresentando áreas mais claras no centro da folha.

O Pacote Teste Bowie Dick Chemdye® e é ideal para economizar o tempo do profissional, pois já está pronto e evita erros provocados por falhas na confecção dos pacotes e ainda custos com lavanderia ou heterogeneidade nos resultados dos testes.

### Características Técnicas

Fabricante: **Terragene**

Marca: **Chemdye®**

Modelo: **BD125X/2**

Procedência: **Argentina**

Composição: **Folha teste Bowie & Dick, folhas de papel poroso, embalado em papel crepado e indicador químico de processo externo.**

Dimensões: **125 x 125 x 16mm**

Parâmetros: **Ciclos a Vácuo 132°C por 4 min.; 134°C por 3,5min.; ou 121°C por 16,9 min.**

**Isto é Chumbo e Materiais Pesados**

Indicador Químico: **Tipo 2**

Apresentação: **Caixa com 20 unidades**

Validade: **5 anos**

Registro ANVISA: **Dispensado**

Normas Regulamentadoras: **ISO 11.140 – 1 e ISO 11.140-4**





# TESTE BOWIE & DICK

## BOWIE & DICK PACOTE PRONTO BD125X/2

### Especificações

O teste Bowie & Dick deve ser realizado diariamente ou sempre após manutenção do equipamento.

Interpretação do Resultado: Amarelo migra para Preto.

Condições de Armazenamento: T° 15-30%, HR 30-80% , manter sob abrigo da luz.

O teste deve ser realizado com a câmara vazia, e o mesmo deve ser posicionado na direção do dreno.

Em caso do teste não apresentar um resultado homogêneo, a assistência técnica do equipamento deve ser acionada imediatamente.

A Folha teste deverá ser acondicionada em pacote confeccionado pelo usuário.

