



Linha de
Produtos para
Biossegurança

Indicadores Químicos

IT261YS VAPOR

Indicadores químicos de único ponto

Para processos de esterilização a Vapor



Os Indicadores integradores químicos Tipo 5 Integron® são tiras impressas com tinta reagente projetadas para mudar de amarelo para o preto quando uma população teórica de esporos atinge o seu tempo de morte, o que indica que a condição de integração (Temperatura, tempo de exposição e qualidade do vapor) foi alcançada. Essa condição é calibrada com o momento da morte de uma população teórica de 106 esporos da bactéria *Geobacillus stearothermophilus*, calculados em um BIER.

Características Técnicas

Fabricante: Terragene
 Marca: Integron
 Modelo: IT261YS
 Procedência: Argentina
 Agente esterilizante: Vapor de água
 Classificação: Tipo 5
 Condições de exposição: Entre 121°C a 135°C.
 Valores declarados: 121°C, 128°C e 135°C.
 Dimensões: 72x23mm
 Cor inicial: Amarelo
 Cor final: Preto
 Tinta 100% isento de Chumbo e metais pesados.
 Apresentação: Bolsa de alumínio com 200 tiras.
 Validade: 5 anos
 Registro ANVISA: Dispensado.
 Norma Regulamentadora: ISO 11140-1: 2014.

Especificações

Armazenamento: Temperatura 10-30°C, HR 30-80%, manter protegido da luz e da exposição de agentes esterilizantes.
 Indicado utilização em cada pacote a ser esterilizado.
 Projetado sob os padrões do Sistema de Gerenciamento de Qualidade ISO 13485:2003/ NS- EN ISO 13485:2012 ANMAT PM 1614-4.



BIOSSEGURANÇA

Sispack Medical
 Rua Doze de Setembro, 1173
 CEP 02052-001 São Paulo
 sispack@sispack.com.br

www.sispack.com.br

Indicadores Químicos

IT261YS VAPOR

Indicadores químicos de único ponto

Para processos de esterilização a Vapor



Leitura de Resultados

A tinta amarela foi desenvolvida para mudar para preto quando são atingidas as variáveis do processo de esterilização (Tempo, temperatura e vapor) indicadas no integrador químico.

Segurança

A incorreta conservação dos indicadores químicos pode inativar seu funcionamento ou modificar a cor final após a exposição ao agente esterilizante.

Usar somente para esterilização a vapor de água.



BIOSSEGURANÇA

Sispack Medical

Rua Doze de Setembro, 1173

CEP 02052-001 São Paulo

sispack@sispack.com.br

www.sispack.com.br