



CLENOX

Solução de Limpeza para Tubulações de Autoclave



Utilizado para limpeza do sistema de geração de vapor da autoclave como tubulações, válvulas e filtros para retirar os sais minerais depositados no seu interior.

Produto ideal para proporcionar a maior durabilidade ao equipamento evitando entupimento.

Características Técnicas

Produto a base de Fosfato Mono Ácido de Sódio, Tensoativo não Iônico, Corante azul de Metileno e Água.

Solução de Limpeza e Higienização

Diluição : **500mL do produto para 1 Litro de Água Destilada**

Temperatura: **Ambiente**

Registro ANVISA: **Notificação 25351.67837/2022-37**

Validade: **1 ano**

Apresentação: **Frasco 500mL**

Aplicação: 1) Retire toda a água do reservatório da autoclave.

2) Dilua o produto na proporção de 1 parte do produto(500ml) para 2partes com água(1 litro).

3) Adicione a solução preparada no reservatório da autoclave.

4) Ligue o equipamento e realize dois ciclos de operação para

esterilização sem acionar o processo de secagem, com a câmara da autoclave vazia.

5) Drene o reservatório novamente

6) Coloque água destilada (1,5 litros) no reservatório e faça um

ou dois novo ciclo.

7) Drene a água do reservatório novamente

8) Coloque água nova e use a autoclave normalmente.

Segurança

Indispensável a utilização de EPI para manipulação.